

NÁVOD K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU – LINGVÁLNÍ/TRANSPALATINÁLNÍ OBLOUK

Určený účel:

Určeným účelem lingválního/transpalatinálního oblouku je udržení nebo korekce pozice zubů.

Cílová skupina:

Je zhotoven individuálně na zakázku a určen pro výlučné použití uživatelem, jemuž byl lékařem předepsán.

Indikace:

Ortodontické aparáty jsou indikovány na základě doporučení zubního lékaře. Jsou indikovány v případech nesprávného postavení zubů, vad skusu nebo pro ovlivnění růstu čelistí.

Výkonové charakteristické vlastnosti:

Individuálně zhotoven. Lingvální/transpalatinální oblouk se fixuje na zubech vsunutím a přivázáním jeho konců do kanyl kroužků nebo přiletováním na kroužky, které jsou cementovány k zubům. Tím se vytváří stabilní základna, odkud se kontroluje pohyb zubů ve zbytku oblouku. Udržuje zuby na místě, přičemž zabraňuje jejich posunu dopředu nebo dozadu. Někdy může být doplněn o pryskyřičnou destičku.

Klinický přínos:

Lingvální/transpalatinální oblouk poskytuje potřebnou podporu, aby došlo k postupnému narovnání nebo udržení zubů.

Kontraindikace:

Prostředek je zakázáno používat u pacientů s vysokou senzitivitou na materiál, z nichž je prostředek vyroben.

Pro výrobu se používají materiály na bázi methylmetakrylátu/polymethylmetakrylátu a kovové slitiny s obsahem prvků, které mohou vyvolat potencionální citlivost u alergiků. Slitiny obecných kovů zpravidla obsahují Cr, Co, Mo, Si, bývají bez Be, In, Ga, Cd a Fe. Některé použité slitiny obsahují nikl.

Alergické reakce v ústech se projevují jako začervenání, puchýřky, otoky, ekzém v ústech a subjektivní příznaky jako např. pálení, svědění, pocit tlaku, poruchy chuti, pocit chlupatosti a cizího tělesa. V případě jakýchkoliv problémů informujte svého zubního lékaře.

Pokyny k použití:

Aparát vyžaduje správnou ústní hygienu a pravidelnou péči. Dodržujte pokyny a doporučení svého zubního lékaře a docházejte na pravidelné kontroly.

Pokyny pro čištění:

Stomatologická laboratoř Ha
Jméno a příjmení: Martin Hat

Adresa: Bezručova 1098, 36001 Karlovy Vary
1.1.2024, rev. 1.0

Datum vydání návodu:

Aparát je třeba čistit stejně pečlivě jako vlastní zuby. K čištění je třeba zubní kartáček a zubní pasta. K čištění mezizubních prostor a kolem aparátu je vhodné používat mezizubní kartáčky, dentální nit nebo ústní sprchu. Čištění je zásadní, aby nedocházelo k zachytávání zbytků potravy a tvoření zubního plaku na aparátu. Tyto faktory nejčastěji způsobují nepříjemný zápach z úst či krvácení dásní. Nedostatečná hygiena může způsobit vznik parodontitidy.

Nedoporučují se abrazivní ani bělicí zubní pasty, které mohou hladký povrch aparátu poškrábat a způsobit tak nežádoucí zanášení nečistotami, usazování zubního kamene, plaku a následně způsobit vznik zápachu.

Se zásadami správného čištění, správným výběrem, efektivním a šetrným používáním všech potřebných pomůcek, Vám poradí Váš ošetřující lékař či dentální hygienista.

Důležitá upozornění:

Pokud pocítíte nepohodlí, bolest, nebo si všimnete poškození prostředku, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Pokud se aparát uvolní nebo rozbije, kontaktujte prosím co nejdříve svého zubního lékaře. Rozbitý aparát nefunguje řádně, což může prodloužit léčbu.

Poučení pro hlášení nežádoucích příhod:

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Doplňující informace:

Pokud aparát napraskne, zlomí se, vylomí se součástka apod., nelikvidujte vylomené/vypadlé části, je potřeba je umýt (dle možností), uložit do krabičky nebo zabalit do sáčku a informovat svého zubního lékaře, příp. stomatologickou laboratoř.

NEPROVÁDĚT OPRAVY SVÉPOMOCÍ, PROTOŽE JE MOŽNÉ NENÁVRATNĚ POŠKODIT PROSTŘEDEK! Lepení, broušení ani jiné neodborné zásahy nejsou dovoleny. Opravy v záruční době se vztahují pouze na výrobní vady, nejedná se o pravidelný bezplatný servis. Opravy musí být provedeny odborně ve stomatologické laboratoři, materiálem a způsobem k tomu určeným.